

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE

NOMBRE DEL PRODUCTO Y NÚMERO DE MODELO

Media máscara filtrante contra partículas FPP2 NR. Norma EN 149:2001+A1:2009 - Reglamento (UE) 2016/425. Marca: XIQUE / Modelo: LK-Z1510

ESTRUCTURA

Está hecha principalmente de tejido no tejido de PP y material filtrante soplado por fusión.

RANGO DE USO

La media máscara filtrante contra partículas está diseñada para usarse como media máscara filtrante contra partículas de un solo turno de trabajo para la protección contra los aerosoles sólidos y líquidos.

ADVERTENCIAS

1. Antes de usar la media máscara, primero verifique que sea adecuada para el uso previsto. El usuario debe estar adecuadamente capacitado para usar y asegurarse de que la media máscara se ajuste correctamente.
2. La media máscara es desechable y no se puede reutilizar.
3. Deseche y reemplace la media máscara si se daña o presenta una mayor resistencia a la respiración.
4. Los pacientes con enfermedades cardíacas u otras enfermedades deben desecharla si su uso se hace incómodo.
5. La media máscara marcada con "NR" no se utilizará durante más de un turno de trabajo.
6. No la utilice en las siguientes atmosferas o ambientes:
 - Ambientes que contienen menos del 19,5% de oxígeno.
 - Atmósferas explosivas.
 - Ambiente con partículas oleosas.
 - Gas o vapor.
 - En presencia de concentraciones de contaminantes desconocidos o concentraciones de contaminantes que son peligrosos para la vida y la salud.
 - Cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible o según las regulaciones gubernamentales aplicables.
7. No la utilice para chorro de arena, pintura en aerosol o trabajos relacionados con el amianto.
8. No altere, abuse de ni use incorrectamente la media máscara.
9. No la use con barba u otro vello facial u otras condiciones que impidan un buen sellado entre la cara y la superficie de sellado de la media máscara.
10. La media máscara se puede usar para filtrar contaminación, pero no puede eliminar totalmente el riesgo de enfermedad o contagio. El uso incorrecto de la máscara provocará

enfermedades o incluso la muerte. Las personas sensibles pueden tener una reacción alérgica debido a la proximidad del material de la piel.

11. No seguir todas las instrucciones sobre el uso de esta máscara y/o no usar esta máscara durante todo el tiempo de exposición reducirá su efectividad y puede resultar en enfermedad o muerte.

12. Los usuarios deben estar capacitados sobre las instrucciones de uso adecuadas antes del uso y seguir las normas relativas a la seguridad y salud.

13. Se recomienda la verificación del sellado por parte del usuario antes de usar la media máscara, consulte los requisitos estipulados en EN149:2001+A12:2009 FFP2 NR.

14. Deseche o cambie la media máscara cuando:

- Dificultad para respirar porque hay demasiada obstrucción en la máscara.
- Apariencia de daños.
- Si se enferma o tiene otros síntomas incómodos, abandone el área de contaminación inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE USO

Use la mascarilla de acuerdo con las instrucciones a continuación para lograr el mejor efecto protector.

1. Saque la mascarilla, no toque la capa interior.
2. Desdoble la mascarilla y colóquela en la cara.
3. Ajuste la correa de ambos lados de la mascarilla a sus orejas.
4. Ajuste la posición del clip nasal a la nariz.
5. Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, reajuste la pieza nasal. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes de la mascarilla, ajuste la posición de las correas y asegúrese de que los bordes de la mascarilla se ajustan perfectamente a la cara.



CONDICIONES Y MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO.

1. Guarde la mascarilla en un ambiente seco con buena ventilación. Evite la luz solar, el fuego y las áreas contaminadas.
2. Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 40 °C y menos del 80% de humedad relativa.
3. Mantenga la mascarilla en su embalaje original durante el transporte para protegerlas contra daños mecánicos y la contaminación.
4. Vida útil: 2 años.